



Der NIPPY Clearway ist ein mechanisches Insufflations-Exsufflations Gerät (MI-E), das unter Anleitung eines Therapeuten, sowohl für Erwachsene als auch für pädiatrische Patienten, verwendet werden kann. Der Zugang erfolgt dabei über eine Gesichtsmaske, ein Mundstück oder ein Tracheostoma.

Kurzanleitung-Inhaltsverzeichnis:

Seite 1

- Punkt 1: Entriegeln | Verriegeln
- Punkt 2: Grundeinstellung | Einstellung abbrechen
- Punkt 3: Set up MANUELLER MODUS

Seite 2

- Punkt 4: Set up AUTO-FIX
- Punkt 5: Set up AUTO-ZEIT

Seite 3

- Punkt 6: Set up AUTO-TRIGGER
- Punkt 7: Set up NIV
- Punkt 8: Set up IPPB

Seite 4

- Übersicht ZUBEHÖR

Seite 5

- eigene Notizen



1 ENTRIEGELN | VERRIEGELN

- Um das Gerät zu entriegeln, halten Sie gleichzeitig die +/- Taste für 4 Sekunden gedrückt, bis das Vorhängeschloss-Symbol am Bildschirmrand geöffnet ist.
- Um das Gerät zu verriegeln, halten Sie wieder gleichzeitig die +/- Taste für 4 Sekunden gedrückt, bis das Vorhängeschloss-Symbol am unteren rechten Bildschirmrand geschlossen erscheint.

2 GRUNDEINSTELLUNG | EINSTELLUNG ABBRECHEN

- Um Einstellungen zu löschen, drücken Sie die „Menü“-Taste und wählen Sie Punkt 4 *Einstellungen löschen* und bestätigen Sie mit + (JA). Der Clearway setzt sich zurück auf *Grundeinstellungen*.
- Um innerhalb eines Menü-Punktes den Vorgang abubrechen wählen Sie „Menue/Esc“.

3 SET UP – MANUELLER MODUS

- Um den *Manuellen* Modus auszuwählen, drücken Sie die Taste „Mode“ und wählen Sie Modus Nr. 1. Bestätigen Sie anschließend mit „Set“.
- Um den Insufflations- und Exsufflations-Druck auszuwählen, drücken Sie die Taste „Ins.“ bzw. „Exs.“. Über die +/-Taste wählen Sie den erforderlichen Druck und bestätigen Sie mit „Set“.
- Sie können die Therapie manuell mit dem Front-Taster oder über die Fernbedienung starten. Die Steuerung der Insufflation, Exsufflation sowie der Pausenzeiten erfolgt manuell.

4 SET UP – AUTO FIX

- Um den *Auto Fix* Modus auszuwählen, drücken Sie die Taste „Mode“ und scrollen Sie zu Modus Nr. 2 *Auto Fix*. Bestätigen Sie anschließend mit „Set“.
- Um den Insufflations- und Exsufflations-Druck auszuwählen, drücken Sie die Taste „Ins.“ bzw. „Exs.“. Über die +/-Taste wählen Sie den erforderlichen Druck und bestätigen Sie mit „Set“.
- Um die Insufflations- (Ti) und Exsufflationzeiten (Te) auszuwählen, drücken Sie die entsprechende Taste Ti oder Te. Wählen Sie über die +/-Taste die Zeit und bestätigen Sie mit „Set“.
- Um die Pause zu setzen, drücken Sie die Taste *Pause*. Wählen Sie mit der +/-Taste die entsprechende Pausenzeit und bestätigen Sie mit „Set“.
- Drücken Sie „Start“ um mit der Therapie zu beginnen. Danach folgen maximal 20 Zyklen.
- Um die Therapie vorzeitig zu beenden, drücken Sie wieder die „Start/Stop“-Taste.

5 SET UP – AUTO ZEIT

- Um den *Auto Zeit* Modus auszuwählen, drücken Sie die Taste „Mode“ und scrollen Sie zu Modus Nr. 3 *Auto Zeit*. Bestätigen Sie anschließend mit „Set“.
- Einstellungen wie unter *Auto Fix*. Zusätzlich können Sie über „InsWdh“ mit der +/-Taste die Anzahl der Insufflationen vor der Exsufflation wählen und über *ZyklWdh* mit der +/-Taste die Anzahl der Zyklen festlegen. Bestätigen mit „Set“.
- Drücken Sie „Start“ um mit der Therapie zu beginnen. Danach folgen maximal 10 Zyklen.
- Um die Therapie vorzeitig zu beenden, drücken Sie wieder die „Start/Stop“-Taste.

6 SET UP – AUTO TRIGGER

- Um den Auto Trigger Modus auszuwählen, drücken Sie die Taste „Mode“ und scrollen Sie zu Modus Nr. 4 Auto Trigger. Bestätigen Sie anschließend mit „Set“.
- Einstellungen wie unter *Auto Zeit*. Zusätzlich können Sie über „Menue“ – „Trigger Einstellungen“ die Triggersensibilität wählen. Wählen Sie eine Pausenzeit die lang genug ist um ein Triggern zu ermöglichen.
- Drücken Sie „Start“ um mit der Therapie zu beginnen. Danach folgen maximal 10 getriggerte Zyklen. Um die Therapie vorzeitig zu beenden drücken Sie wieder die „Start/Stop“-Taste.

7 SET UP – NIV

- Um den NIV Modus auszuwählen, drücken Sie die Taste „Mode“ und scrollen Sie zu Modus Nr. 5 NIV Bestätigen Sie anschließend mit „Set“.
- Um den Inspirations- und Expirationsdruck auszuwählen, drücken Sie die Taste „Ins.“ bzw. „Exs.“.
- Über die +/-Taste wählen Sie den erforderlichen Druck (IPAP / EPAP). Drücken Sie „InsWdh“ um die Backup-Frequenz einzustellen (max. 30 bpm) und bestätigen Sie mit „Set“. Zusätzlich können Sie über „Menue“ – „Trigger Einstellungen“ die Triggersensibilität wählen.
- Drücken Sie „Start“ um mit der NIV-Beatmung zu beginnen. Die Behandlung stoppt nach 15 Minuten.
- **Verwenden Sie immer ein Leckageventil im Beatmungsschlauch, um eine CO2-Auswaschung zu gewährleisten.**


8 SET UP – IPPB

- Für den IPPB Modus stellen Sie in den Modi 1-4 den Exsufflations-Druck „Exs“ auf 0 cm H₂O. Bestätigen Sie anschließend mit „Set“.
- Drücken Sie „Start“ um mit der IPPB-Therapie zu beginnen.
- **Für längere IPPB Anwendungen benutzen Sie bitte den IPPB-Patientenschlauch (Artikel 0960.120), um eine optimale CO2-Auswaschung zu gewährleisten.**

ZUBEHÖR

Artikelnummer

0960D	NIPPY Clearway Hustenassistent	Stk
0960100	NIPPY Clearway Starter-Kit	Stk
0960101	NIPPY Clearway Schlauchsystem mit Bakterienfilter	VE/10 Stk.
0960102	NIPPY Clearway Gänsegurgel	VE/10 Stk.
0960104	NIPPY Clearway Nasenclip	VE/10 Stk.
0960105	NIPPY Clearway Mundstücke&Nasenclip	VE/10 Stk.
0960107	NIPPY Clearway Bakterienfilter	VE/10 Stk.
0960109	NIPPY Clearway Fernbedienung	Stk
0960110	NIPPY Clearway Transporttasche	Stk
0960111	NIPPY Clearway externe Batterie, Li-Ion	Stk
0960112	NIPPY Clearway Ladegerät für externe Batterie	Stk
0960114	NIPPY Clearway Transporttasche - Mobility Bag	Stk
0960115	NIPPY Clearway Gerätewagen/Stativ, 5 Rollen	Stk
0960116	NIPPY Clearway Luftfilter	VE/5 Stk.
0960117	NIPPY Clearway Fuß-Schalter	Stk
0960120	NIPPY Clearway IPPB Schlauchsystem	VE/10 Stk

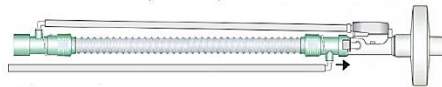

Notizen:

15 horizontal grey bars for notes.